

Mini prístroj pre dychovú skúšku na alkohol

IC 818 – Návod na použitie

Vlastná skúška pred jazdou

- Funkcia kľúčenkovej lampy
- 2 skúšobné indikátory
- AAA batérie
- 45 g vrátane batérie

Blow	Vdýchnutie
Power LED (Torch)	Kontrolka napájania (lampa)
Power bottom	Tlačidlo napájania



PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA

1. **Vyčistenie:** Niekoľkokrát stlačte a uvoľnite tlačidlo (zap-vyp-zap-vyp ...).
2. **Zapnutie napájania:** Po VYČISTENÍ počkajte 15 sekúnd, potom zapnite napájanie stlačením a pridržením tlačidla.
3. **Vdýchnutie / skúška:** Ak je napájanie zapnuté, vdýchnite a počkajte na výsledok skúšky.
4. **Výsledok skúšky:** Hladina alkoholu užívateľa
5. **Žltá:** Varovná hladina alkoholu v krvi nad 0,2 ‰ resp. 0,1 mg/l
 - Červená: Nebezpečná hladina alkoholu v krvi nad 0,5 ‰ resp. 0,25 mg/l
 - Nesvieti: Nižšia ako varovná hladina (vypnite a skúšku opakujte).
6. **Vypnutie napájania:** Uvoľnite tlačidlo napájania. (Tlačidlo neuvolňujte v priebehu vyššie uvedenej skúšky.)
7. **Opakovaná skúška:** Vypnite na 10 sekúnd a začnite druhú skúšku.

(Upozornenie)

- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (zinkovuhlíkové) a dobíjacie (niklokadmiové) batérie.
- Batérie nezhadzujte do ohňa. Batérie môžu explodovať.

Klinicky testované ve spolupráci s **ÚSTAVEM SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ** v Brně. Tento prístroj je určen výhradne pro orientační měření obsahu alkoholu v krvi a z právního hlediska se na výsledky pochopitelně odvolávat nelze.

Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:

Compex Slovakia spol. s r.o.

Trnavská cesta 67, 821 01 Bratislava

vo svojom centrálnom servisnom stredisku na vyššie uvedenej adrese.

☎ 02 436 402 62, 02 436 402 61



Prístroj je schválený pre používanie v krajinách EÚ. Všetky príslušné CE Certifikáty a prehlásenia o zhode sú k dispozícii u predajcu, firmy Compex spol. s r.o.